



КАТАЛОГ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОБУВИ


СУРСИЛ-ОРТО

Терапевтическая обувь СУРСИЛ-ОРТО предназначена:

- для применения в послеоперационном периоде с целью разгрузки разных отделов стопы после выполненных операций;
- при травматических повреждениях стопы;
- для лечения длительно незаживающих язв при сахарном диабете и других нейротрофических нарушениях;
- при патологиях, когда возникает необходимость разгрузки различных отделов стопы.

Терапевтическая обувь разработана на основании многолетнего опыта работы со специалистами, которые в своей медицинской практике ежедневно сталкиваются с необходимостью назначения такой обуви.


Модели терапевтической обуви имеют следующие характеристики:

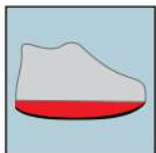

Подошва сделана из твердого материала (ЭВА), и заканчивается слоем плотной резины, которая обеспечивает устойчивость к стиранию при контакте с твердой поверхностью при ходьбе. При необходимости резиновый слой после предварительного нагревания может быть снят частично или полностью и обточить подлежащий материал с целью придания нужной формы



Съемная вкладная стелька выполнена из материала, который легко поддается обработке – то есть можно создать дополнительную разгрузку под проблемными зонами

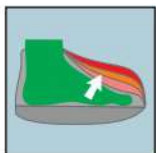

Пациент может одеть данную обувь с достаточно объемной повязкой, потому что конструкция всех моделей терапевтической обуви позволяет широко регулировать полноту



Обувь можно стирать при температуре 60 градусов








Верх обуви сделан из дышащих гипоаллергенных материалов, которые создают благоприятный микроклимат для заживления ран.




Обувь сертифицирована

СОДЕРЖАНИЕ

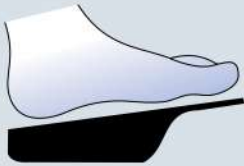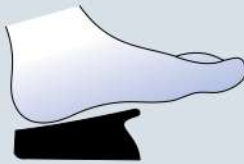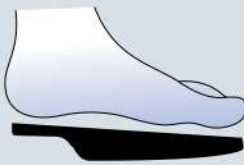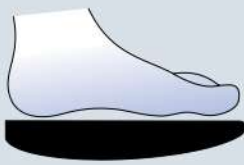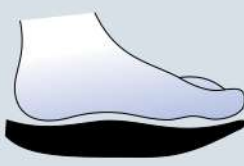	Обувь для разгрузки переднего отдела стопы: Артикул 09-101.....стр.2
	Обувь для разгрузки переднего отдела стопы: Артикул 09-108.....стр.4
	Обувь, снимающая нагрузку на пятку: Артикул 09-100.....стр.5
	Обувь, снимающая нагрузку на пятку: Артикул 09-110.....стр.6
	Многоцелевая терапевтическая обувь: Артикул 09-107.....стр.7
	Многоцелевая терапевтическая обувь: Артикул 09-102.....стр.8 Артикул 09-106.....стр.9
	Обувь на гипсовые повязки: Артикул 09-112.....стр.10

Артикул 09-101

ОБУВЬ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

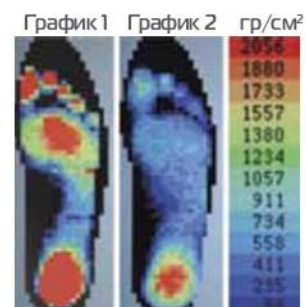


Данная модель обеспечивает разгрузку переднего отдела стопы. Специальная клиновидная форма подошвы способствует перемещению нагрузки с переднего на задний отдел стопы. Снижение нагрузки на передний отдел стопы создает условия для заживления ран, локализованных в данном отделе. Применяется после операций на переднем отделе стопы, а также для больных сахарным диабетом при появлении язв в переднем отделе стопы. Используется также при наличии ран на стопе в переднем отделе. Обувь снабжена съемной стелькой, что облегчает гигиенический уход за ней.

- На графике 1 показано распределение нагрузки на стопу в обычной обуви;
- На графике 2 показано распределение нагрузки в данной разгрузочной обуви.

Показания к применению:

1. После операций на переднем отделе стопы
2. Посттравматические повреждения переднего отдела стопы
3. При открытых ранах и язвах на подошве в переднем отделе стопы
4. При острой отечности переднего отдела стопы, при падагре и бурситах.

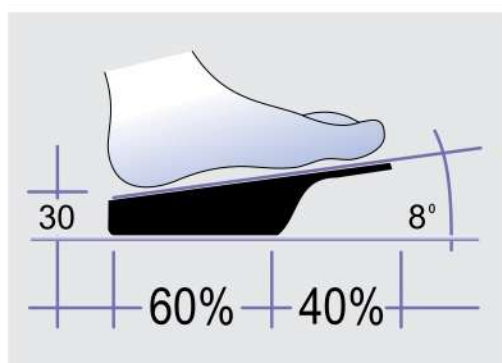

⚠ Угол наклона клина в данной модели 8° а соотношение длины задней части к передней (60:40) являются оптимальными для разгрузки переднего отдела стопы






⚠ Излишняя часть ремешка отрезается

С целью защиты от попадания пыли и влаги на раневую повязку, а также как для утепления в холодную погоду обувь может комплектоваться дополнительно специальной накладкой.




Артикул	Размер	Соответствие размера
09-101	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XL	44-46
	XXL	47-49

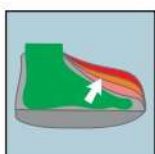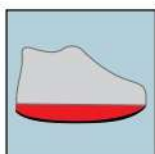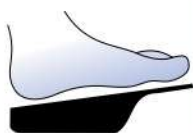

Артикул 09-108




ОБУВЬ, СНИМАЮЩАЯ НАГРУЗКУ НА ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ СТОПЫ

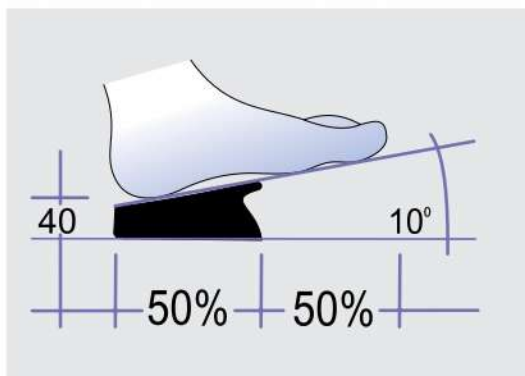

⚠ Угол наклона клина в данной модели 10° а соотношение длины задней части к передней (50:50) являются оптимальными для разгрузки переднего отдела стопы


Данная модель обуви полностью снимает нагрузку с переднего отдела стопы. Применяется после хирургических вмешательств на переднем отделе стопы, при травматических повреждениях переднего отдела стопы, переломах плюсневых костей и фаланг пальцев, а также при наличии язв (ulcera) на стопе. Обувь снабжена съемной стелькой, что облегчает уход за ней.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-108	S	36-38
	M	39-42
	L	43-46
	XL	47-51

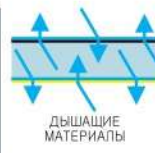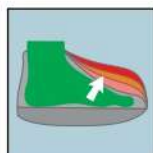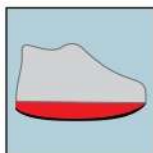

Артикул 09-100

ОБУВЬ, СНИМАЮЩАЯ НАГРУЗКУ НА ПЯТКУ

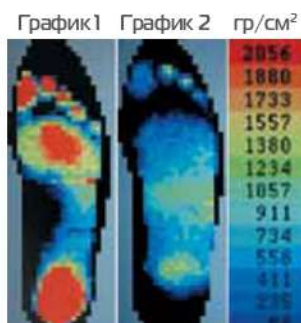


Полностью снимает нагрузку на пятку. Применяется после хирургических вмешательств на заднем отделе стопы, при наличии на пятке повреждений, переломов, а также при язвах (ulcera) на пятке.

- **На графике 1** показано распределение нагрузки на стопу в обычной обуви;
- **На графике 2** показано распределение нагрузки в данной разгрузочной обуви.

Показания к применению:


1. После операций на заднем отделе стопы
2. Посттравматические повреждения заднего отдела стопы
3. При открытых ранах и язвах на подошве на заднем отделе стопы
4. При болезненностях, воспалительных явлениях в области пятки.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-100	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XL	44-46

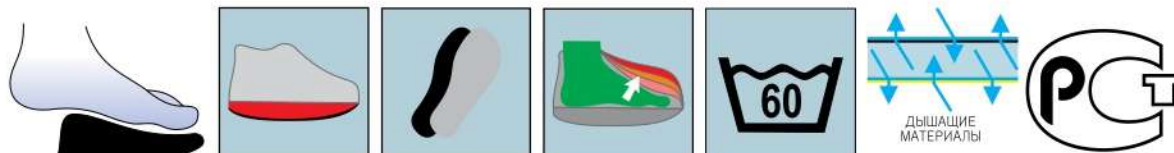

Артикул 09-110

ОБУВЬ, СНИМАЮЩАЯ НАГРУЗКУ НА ПЯТКУ

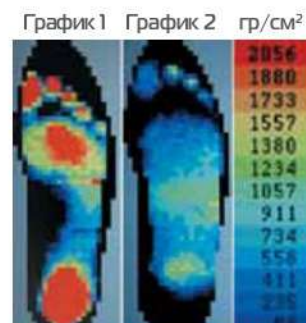





Полностью снимает нагрузку на пятку. Применяется после хирургических вмешательств на заднем отделе стопы, при наличии на пятке повреждений, переломов, а также при язвах (ulcera) на пятке.

- На графике 1 показано распределение нагрузки на стопу в обычной обуви;
- На графике 2 показано распределение нагрузки в данной разгрузочной обуви.

Показания к применению:

1. После операций на заднем отделе стопы
2. Посттравматические повреждения заднего отдела стопы
3. При открытых ранах и язвах на подошве на заднем отделе стопы
4. При болезненностях, воспалительных явлениях в области пятки.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-110	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XL	44-46

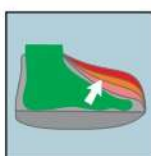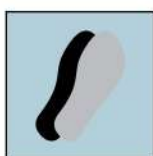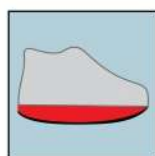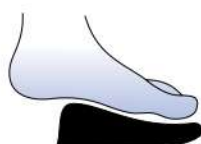


Артикул 09-107

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



График 1 График 2 гр/см²

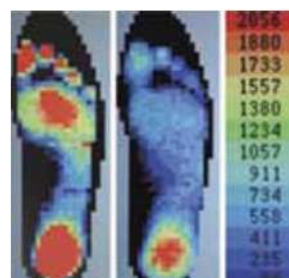




Рекомендуется для больных сахарным диабетом, особенно при образовании язв на ступне (neuropathic ulcers). Также применяется при «ревматоидной стопе», при недостаточном артериальном кровообращении, при наличии ран на ступне. Обувь снабжена съемной стелькой, что облегчает гигиенический уход за ней.

- Может использоваться как компенсаторный ботинок при оперативном лечении одной стопы. То есть если на оперированную стопу применяется разгрузочная модель на передний отдел стопы или на пятку, то на противоположную стопу применяется компенсаторный ботинок.

С целью защиты от попадания пыли и влаги на раневую повязку, а также для утепления в холодную погоду обувь может комплектоваться дополнительно специальной накладкой.



Артикул	Размер	Соответствие размера
09-107	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XL	44-46
	XXL	47-49

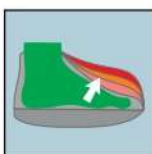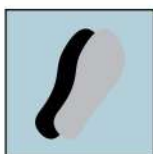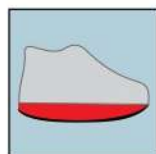




Артикул 09-102

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



Применяется при диабетической и ревматоидной стопе для профилактики образования язв, потертостей. Применяется после небольших хирургических вмешательств на стопе, при наличии язв, ран и повреждений на стопе, при недостаточном артериальном кровообращении. Для облегчения больному процедуры надевания или снятия обуви передняя часть обуви обладает полной раскрываемостью за счет липучек на всю длину обуви. Обувь снабжена двухслойной съемной стелькой, что облегчает гигиенический уход за ней.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-102	XXS	35-36
	XS	37-38
	S	39-40
	M	41-42
	L	43-44
	XL	45-46
	XXL	47-48

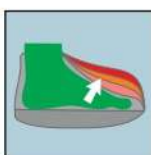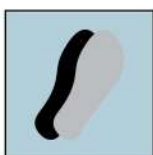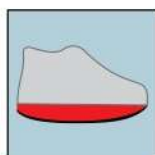




Артикул 09-106

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



Применяется при диабетической и ревматоидной стопе для профилактики образования язв, потертостей. Применяется после небольших хирургических вмешательств на стопе, при наличии язв, ран и повреждений на стопе, при недостаточном артериальном кровообращении. Для облегчения больному процедуры надевания или снятия обуви передняя часть обуви обладает полной раскрываемостью за счет липучек на всю длину обуви. Обувь снабжена двухслойной съемной стелькой, что облегчает гигиенический уход за ней.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-106	XXS	35-36
	XS	37-38
	S	39-40
	M	41-42
	L	43-44
	XL	45-46
	XXL	47-48

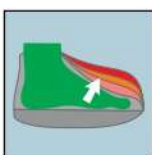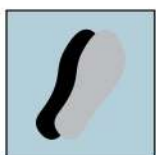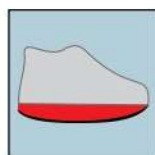

Артикул 09-112

ОБУВЬ НА ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ



Эта модель создана для гипсовых либо полимерных повязок. Легкая, быстро застегивающаяся при помощи застежек на липучках. Защищает иммобилизирующую повязку от загрязнения и повреждения. Слегка полукруглая подошва обеспечивает удовлетворительный перекат стопы при фиксированном голеностопном суставе. Множество типоразмеров позволяют подобрать нужный для детей и взрослых.

Размер	XXXS	XXS	XS	S	M	M/L	L	XL
Длина в см	17	22,5	20	25	27,5	29,5	30	35
Соответствие размера	24-28	33-36	29-32	37-40	41-43	44-45	46-48	49-53

